

Endo-Prep CREAM

CE 2409

Preparazione chimica-meccanica dei canali

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
SOLO PER USO DENTALE

COMPOSIZIONE: DisodioEdetato (EDTA), perossido di urea, acqua (Ph.Eur.), propilene glicolico
USO

Il prodotto EndoPrepCream è inteso per la preparazione chimica-meccanica dei canali, l'EDTA contenuta nel prodotto aiuta a rimuovere i sali di calcio e la polpa dai canali calcificati permettendo una più veloce pulizia e modellazione dei canali. Quando usato in congiunzione con Ipoclorito di Sodio ha un effetto sbiancante sul dente che potrebbe essere discolorato in seguito alla necrosi. La schiuma prodotta dalla reazione tra l'urea e l'ipoclorito permette di rimuovere i detriti rimanenti e la dentina dal canale.

Grazie alle sostanze lubrificanti contenute nel prodotto è molto più facile lavorare con gli strumenti canalari, il rischio di rottura dello strumento viene minimizzato.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima del trattamento immergere l'applicatore nell'alcol etilico e quindi applicarlo alla siringa. Aprire la cavità ed irrigare con Ipoclorito di Sodio, inserire Endo-PrepCream nella cavità con l'applicatore in dotazione o su uno spingipasta. Preparare il canale meccanicamente ed irrigare simultaneamente con Ipoclorito. Risciacquare ed eliminare il prodotto dal canale finché il processo reattivo è finito.

Il prodotto è inteso per uso multiplo escluso l'applicatore che è monouso. L'uso multiplo dell'applicatore può causare rischio di infezioni.

CONTROINDICAZIONI

Non usare su pazienti con iper-sensibilità ai componenti del prodotto.

Non lasciare EndoPrepCream nel canale tra le visite, può indebolire oltre misura la dentina.

ATTENZIONE

Durante la preparazione del canale va fatta la massima attenzione all'area apicale in quanto può essere perforata dall'uso degli strumenti canalari. Il prodotto può causare irritazione agli occhi ed alla pelle, in caso di contatto lavare con abbondante acqua. Consultare un medico se l'irritazione non diminuisce.

È necessario l'uso di digi in gomma, occhiali ed indumenti protettivi.

MANTENIMENTO

Conservare nella confezione originale ad una temperatura tra 2-15°C.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

La data di scadenza è indicata sulla confezione principale, una volta aperto il contenitore la data non cambia se chiuso correttamente dopo ogni uso.

GESTIONE DELL'IMBALLO

I contenitori vuoti devono essere smaltiti con responsabilità

CONFEZIONI

Siringa da 2ml, 5ml o 10ml di prodotto, applicatori monouso.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85